

① ② Назначение / Противопоказания

Ортез голеностопного сустава для профилактики рецидива косолапости. Используется только с планками для наружного разворота ① или с абдукционным механизмом с тыльной флексией ②. Не использовать при нескорректированной косолапости или в случае рецидива. Если есть сомнения, обратитесь к лечащему врачу.

③ Предупреждения и меры предосторожности


Ортопедическое устройство. Только для поддержания коррекции косолапости. Используется только в ночное время и во время сна. При ношении устройства не позволяйте пациенту ходить, бегать, прыгать или играть. Используйте устройство того размера и конфигурации, которые предписаны лечащим врачом. В случае непереносимости или постоянного дискомфорта снимите устройство и обратитесь к лечащему врачу. Не пользуйтесь поврежденным устройством. Устройство не стерильно и предназначено только для первоначального конечного пользователя. Устройство можно вернуть в компанию C-Pro Direct для безопасной утилизации, или утилизировать / отдать во вторичную переработку вместе с обычными домашними отходами. Температура хранения: от +2 до +22 °С. Не следует допускать попадания на устройство от прямого солнечного света, устройство следует хранить в чистом и сухом виде.

1**1 Проверьте комплектность**

- 1а. Пара ортезов голеностопного сустава или один ортез.
- 1б. Два комплекта язычков (с запасным) на каждый ортез.
- 1би Основной язычок
- 1бii Клейкие «липучки» круглой формы
- 1бiii Язычок (язычки) для пальцев ног
- 1с. Индикатор положения пятки


2**2 Установите язычки в ортез (только при первичной подгонке)**

Устанавливайте язычки только при необходимости. Язычки могут обеспечить дополнительную защиту от раздражения кожи. После установки язычки держатся на месте, как показано на рисунке.

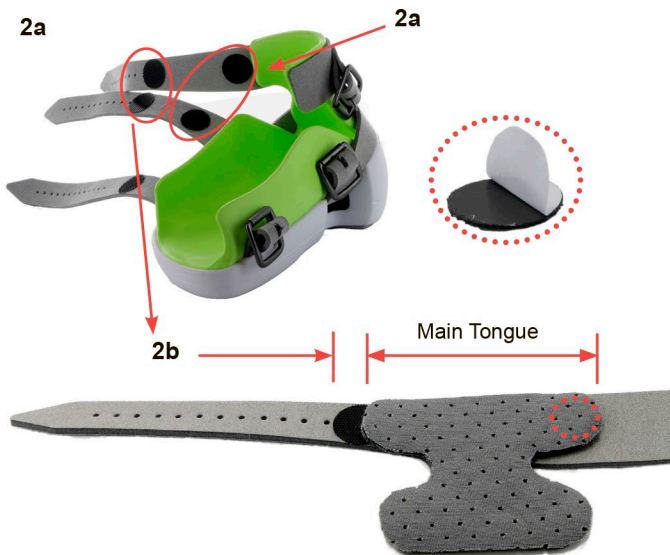


2a. Приклейте две круглые «липучки» к ремешкам. «Липучки» должны располагаться рядом с зеленой подбивкой. Крепко нажмите на круглые «липучки».

2b. Приклейте к ремешкам еще две круглые «липучки». Язычок должен перекрывать их, как показано на рисунке.

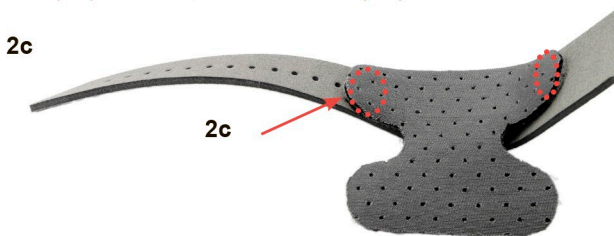

2c. Отрегулируйте язычок так, чтобы он полностью перекрывал вторую «липучку». Ремешок примет изогнутую форму, как показано на рисунке.

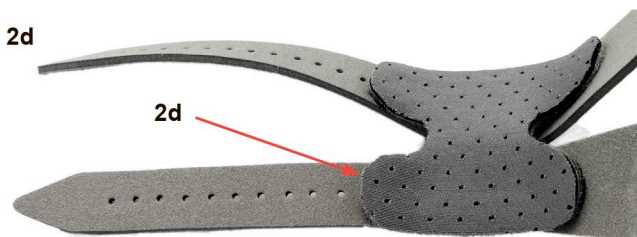

2d. Повторите те же действия на среднем ремешке.

2e. Если нужно, установите язычок для пальцев ноги с помощью одной или двух круглых «липучек».

3a



3b



3c



3 Наденьте сандалию на пациента

3a. Вденьте ногу в сандалию. Следите, чтобы пятка сидела как можно плотнее к заднику сандалии. Плотно застегните средний ремешок.


3b. Застегните верхний ремешок.

3c. Застегните нижний ремешок (ремешки).


4



4b

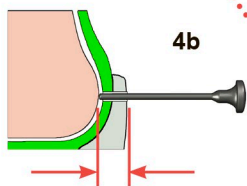

4c

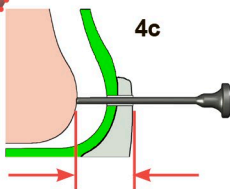

4 Проверка положения пятки

4a. Если у вас есть сомнения касательно правильного положения пятки, используйте индикатор положения пятки.

4b. Пятка сидит плотно к заднику. Это наилучшее положение.

4c. Зазор между пяткой и задником. Проконсультируйтесь с врачом.