


① Назначение / Противопоказания

Планки для наружного разворота ADM предназначены для профилактики рецидивов косопласти. Использовать только с ортезами голеностопного сустава ADM по назначению врача. Не использовать при нескорректированной косопласти или в случае рецидива. Если есть сомнения, обратитесь к лечащему врачу.

② Длина планки

Сандалии обычно разводятся примерно на ширину плеч. Метки на планке равняются измеренной ширине плеч (X мм). Используйте планку длины, близкой к ширине плеч (X мм). Если планка слишком коротка, пациенту будет труднее переносить ее использование, также увеличится нагрузка на колени и бедра. Слишком длинные планки менее эффективны.

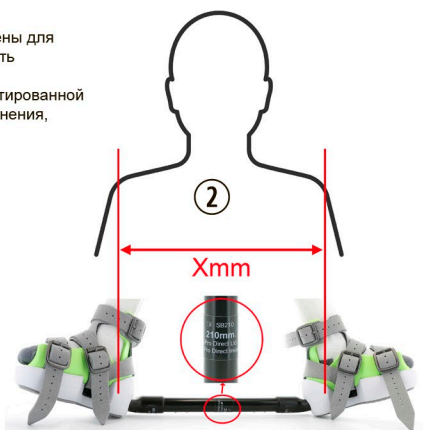

③ Выберите один правый и один левый разъем

Обычно угол разъема выбирают следующим образом: 60° для типичной косопласти, 45° для сложной анатомии стопы, когда процедура трудно переносится пациентом, 30° для случаев, когда косопласть есть только на одной ноге.



④ Сборка планки

Установите разъемы с обоих концов планки. Убедитесь, что оба пружинных фиксатора щелкнули и вышли через отверстия в планке, обеспечивая надежное крепление.



⑤ Присоедините планку к ортезу ADM

Надев ортез голеностопного сустава ADM на пациента, присоедините собранную планку к ортезам. Убедитесь, что стопы разведены (абдукция и тыльная флексия), как показано на рисунке.

до щелчка



⑥ Как снять разъем

Чтобы снять разъем с планки, используйте съемное приспособление. Наложите съемное приспособление на пружинные фиксаторы и нажмите на него. Теперь разъем можно повернуть, чтобы пружинные фиксаторы вышли из отверстий в планке. Теперь можно убрать съемное приспособление. Вытащите разъем из планки.

Съемное приспособление



нажать

повернуть



вытянуть

⑦ Предупреждения и меры предосторожности

Ортопедическое устройство. Только для поддержания коррекции косолапости. Используется только в ночное время и во время сна. При ношении устройства не позволяйте пациенту ходить, бегать, прыгать или играть. Используйте устройство того размера и конфигурации, которые предписаны вашим врачом. В случае непереносимости или постоянного дискомфорта снимите устройство и обратитесь к вашему врачу. Не пользуйтесь поврежденным устройством. Устройство не стерильно и предназначено только для первоначального конечного пользователя. Устройство можно вернуть в компанию C-Pro Direct для безопасной утилизации или утилизировать / отдать во вторичную переработку вместе с обычными домашними отходами. Температура хранения от +2 до +22 °C. Устройство следует хранить вдали от прямого солнечного света, в чистом и сухом виде.



c-prodirect